




Használati útmutató

Előkészítés

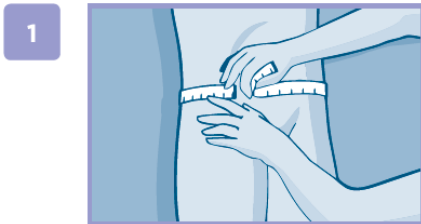

1 Az Attends Contours (6-10) betétek használatához Attends rögzítőnadrág (Stretch Pants) szükséges. Fontos a megfelelő méretű rögzítőnadrág kiválasztása – mérje le a csípő és a derék körméretét és a nagyobb értéket használva válassza ki a megfelelő méretű rögzítőnadrágot.




2 Húzza fel a rögzítőnadrágot, majd tolja le térd fölötti magassáig és hajtsa fel az övrészt. Nyissa szét teljesen a betétet és győződjön meg arról, hogy a ragasztófelület kívülre, a puha, fehér pamutos rész pedig a test felé esik. Finoman hajtsa fel hosszanti irányban – csónakot formázva – a betétet, így biztosítva, hogy a szivárgásvédelmi szegélyek megfelelően álljanak. Ne fogja meg a szegélyeket, azok maguktól fognak természetesen illeszkedni a betéttel együtt.




Rögzítés


Helyezze a betétet előlről a combok közé, a nagyobb részét az ülep irányába hátra.

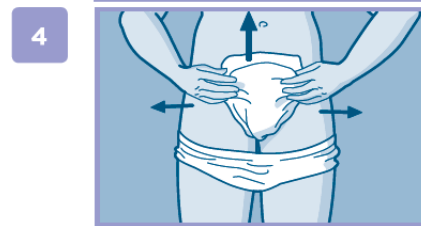

4 Simítsa ki a betétet és húzza fel a rögzítőnadrágot az ágyék irányába úgy, hogy pontosan illeszkedjen a testhez.

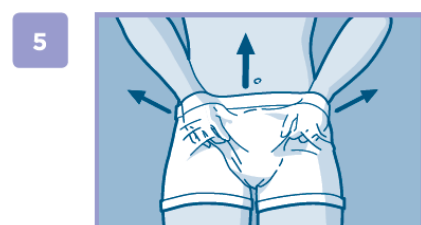

5 Igazítsa el a rögzítőnadrágot úgy, hogy befedje a betétet és győződjön meg róla, hogy a hátsó rész nem gyűrődött fel.

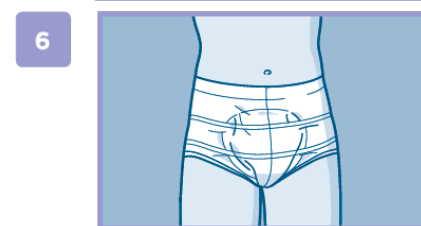

6 A rögzítőnadrág el kell, hogy fedje a betétet. Végül ellenőrizze, hogy mind a rögzítőnadrág, mind a betét megfelelően illeszkedik.

Tanácsok és Tippek

Kiválasztás

Olyan nedvszívású betétet válasszon, mely megfelel a beteg igényeinek.

A derék/csípő méretének megfelelő rögzítőnadrágot válasszon.

5-ös nedvszívó fokozatig megfelelően testhez álló fehérneművel bármely betét hordható.

Minél kisebb betétet választunk, annál nagyobb a beteg komfortérzete.

Felhasználás

Ellenőrizze, hogy megfelelően széthajtotta-e a betétet felhasználás előtt.

Ne rázza meg a betétet!

A betét kisebbik végét helyezze előre, a nagyobbikat pedig a test hátuljához.

Finoman hajtsa fel a betétet hosszanti irányban, csónakot formázva.

Ne fogja meg a szivárgásvédelmi szegélyeket, azok maguktól fognak természetesen illeszkedni a betéttel együtt.

Férfiak esetében pozícionálja a betétet előre a fehérneműben, míg nők esetében középre.

Győződjön meg róla, hogy megfelelő méretű rögzítőnadrágot vagy annak megfelelő fehérneműt alkalmaz-e.

Ha a betét alkalmazásakor a beteg fekvő testhelyzetben van, ugyan azt az eljárást kövesse, mint álló testhelyzetben.

A betét cseréje

Ellenőrizze a nedvességjelzőt – ha a nedvességjelző a betét hosszának több mint feléről (60 %) eltűnik, a betét cseréje szükségessé válik.

A tiszta és száraz betét WC használat után újra felhasználható.

Távolítsa el a beszennyeződött betétet a hátsótól.

Tisztítsa meg a bőrt a helyi szokásoknak megfelelően. A tisztítással haladjon előlről hátulra.

A megoldható, kerülje az olaj alapú krémeket. Hintőport ne használjon, mivel hatással lehet a nedvszívó képességre és megakadályozhatja a vizelet elszívását, ezáltal kockázatnak téve ki a bőrt.

Szivárgás

Ellenőrizze a használat minden aspektusát.

Ellenőrizze, hogy megfelelő méretű-e a rögzítőnadrág.

Csak akkor válasszon nagyobb nedvszívó kapacitású terméket, ha a szivárgás oka nem a felhasználás módjában van és szakértő állapítja meg a szükségességét.

Megsemmisítés

Csavarja össze a betétet és a helyi hulladékkezelési szabályoknak megfelelően semmisítse meg.

Ne húzza le a WC-n.

Az Attends rögzítőnadrág többször használatos.