

Használati útmutató

-Rögzítő nadrág-



Kérjük, kövesse ezeket az iránymutatásokat:

- Az Attends rögzítő nadrágot az Attends Contours Regular együtt kell használni.
- Fontos a rögzítő nadrágok helyes méretezése - mérje meg a személy csípőjét és derekát, és a két mérés közül a nagyobbik segítségével biztosítsa a megfelelő rögzítő nadrágméret kiválasztását.
- Lábaival bújjon bele a rögzítő nadrág két szárába, majd húzza fel a térd fölé.
- Helyezze bele a betétet.
- Húzza fel a rögzítő nadrág egészen az ágyéktájékig, hogy biztosítsa a pontosan illeszkedjen.
- Állítsa be a nadrágot úgy, hogy a betétet fedje.