


Attends® Slip Regular



Használati útmutató


Előkészület:

1

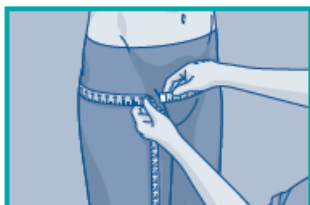

Válassza ki a megfelelő méretet, mérje meg a csípőjét és a derekát, és válassza ki a kettő közül a legnagyobbat, hogy megtalálja a méretét.

2

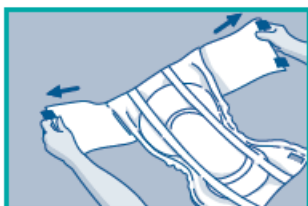


Nyissa ki teljesen a terméket, és helyezze a végét a szárnyakkal és a rögzítőszalagokkal együtt a hátoldalra, ügyelve arra, hogy a szárnyak teljesen kinyíljanak, mielőtt felhelyezné a betétet. Győződjön meg róla, hogy a hátlap kívül van, és a puha fehér belső bélés a bőr mellett van.

3



Óvatosan nyomja össze, hogy meggyőződjön, hogy a szivárgásától réteg a bőr felületéhez érintkezik.

4

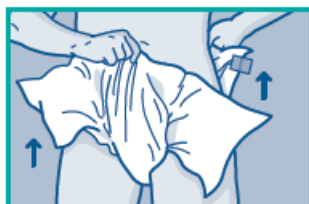

Igazítsa a betétet úgy, hogy a lábak között szorosan illeszkedjen, de viselője kényelmesnek érezze azt lágyék tájékán is.

5



Óvatosan húzza ki a szárnyat előre és rögzítse a szalagokat.

6



Rögzítse az alsó szalagokat úgy, hogy azok felfelé álljanak ezzel biztosítva az ágyék menti pontos illeszkedést. Majd rögzítse a felső szalagokat lefelé álló pozícióba, hogy a derék mentén is kényelmesen illeszkedjen.

Tanácsok és tippek:

Termék kiválasztása:

- Fontolja meg az Attends betét használatát mielőtt áttér a nadrágpelenkára - ezek sokkal nagyobb diszkréciót biztosítanak.
- Válassza ki a terméket a csípő- vagy derékméretnek megfelelően amelyik a nagyobb.
- Válassza ki a nedvszívó képességet a vizelet mennyiségétől függően. Kezdje az alacsonyabb nedvszívó képességű például a 8-as szintet, mielőtt magasabbra váltana, a diszkrétebb és kényelmesebb illeszkedés érdekében.

Csere

- Ellenőrizze a nedvességjelzőt - ha a nedvességjelző eltűnt a betét hosszának felénél (60%), vagy ha a termék széket tartalmaz, a betétet cseréire szorul. A Slip Regular Small és az Extra Large, ha a nedvességjelző a sárgáról kék színűvé változott a betét hosszának felénél (60%), vagy ha a betétet széket tartalmaz, a betétet ki kell cserélni.
- Zárja vissza és használja újra a Slip-et WC-használat után, ha a termék tiszta és száraz.
- Ne ragasszon ragasztó csíkot a bőrre.
- Tisztítsa meg a bőrt a helyi szabályoknak megfelelően. Tisztítsa meg előlről hátrafelé.
- Lehetőség szerint kerülje az olaj alapú krémeket és egyáltalán ne használjon púdereket. Ezek befolyásolják az abszorpciós képességet. megakadályozzák a vizelet felszívódását, és a betétet a bőrt veszélyeztetik.

Illeszkedés:

- Győződjön meg róla, hogy a gumírozott rész a lábszártónél a betét külső részén helyezkedik el.
- Tartsa a ragasztószalagokat hátul a pelenka felhelyezésekor- így tudja, hogy a megfelelő irányban van.
- A pelenka rögzítésekor először az alsó szalagokat rögzítse. felfelé, majd a felső szalagokat lefelé, hogy kényelmes, pontos illeszkedést biztosítson.
- Ha a terméket a felhasználó fekvő helyzetben szereli fel, ugyanazt a sorrendet kövesse, mint ha álló helyzetben szerelné fel. Annak biztosítása érdekében, hogy a termék a helyén maradjon, helyezze a kezét a pelenka hátuljára, amikor a beteget megfordítja.
- Használja a nedvességjelzőt a betét középre helyezéséhez.

Szivárgás:

- Ellenőrizze a pelenka megfelelő illeszkedését.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő méret használ-e.
- Csak akkor növelje a betét nedvszívó képességét, ha ellenőrizte, hogy ez nem illeszkedési probléma, és ezt klinikailag igazolt is.

Eltávolítás:

- Tekerje fel a pelenkát, és a helyi hulladékkezelési szabályoknak megfelelően hatástalanítsa.
- Ne húzzuk le a WC-n.

Attends[®] Slip Regular



Attends Slips are tested and approved by proDERM, Institute for Applied Dermatological Research (does not include Slip Regular 9XS or 10XL)

További információkért keresse a www.replant4care.hu weboldalát.