




Használati útmutató

Előkészítés

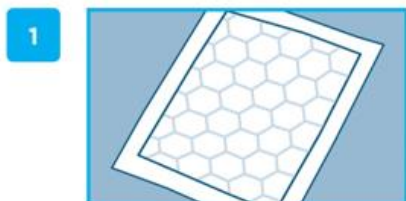

Nyissa ki teljesen a terméket, fektesse az ágyra ügyelve arra, hogy a vízálló hátlap az alulra kerüljön, és a puha, fehér, nedvszívó réteg érintkezzen a bőrrel.

Elhelyezés



Helyezze a személyt az alátételre.

Csere



Fordítsa a személyt oldalhelyzetbe, és tekerje fel a használt alátétet a személy háta felé.




Hajtsa ki az új alátétet, és helyezze a személy háta mögé.



Fordítsa a személyt az alátételre, és győződjön meg arról, hogy a párnázott puha oldalán fekszik. Távolítsa el a használt terméket.

6

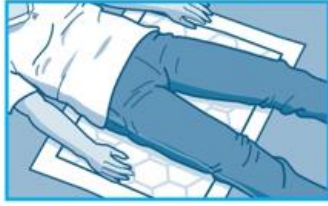

Fektesse a személyt az eredeti helyzetébe.

Tanácsok és tippek:

Kiválasztás

- Válassza ki a megfelelő termékméretet és nedvszívó képességet attól függően, hogy milyen klinikai helyzetben használja a terméket.

Szivárgás

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű és nedvszívó képességű alátétet használja-e az adott helyzetben.

Hulladék kezelés

- Tekerje össze a párnákat, és a klinikai hulladékokra vonatkozó szabályzata szerint ártalmatlanítsa.
- Ne dobja bele a WC-be.



Attends Cover-Dri are tested and approved by proDERM, Institute for Applied Dermatological Research (does not include Cover-Dri Special Care).