



Használati útmutató

Előkészítés



Mérje meg a csípőt és a derekat, és a két mérés közül a nagyobbik segítségével biztosítsa a megfelelő termékméret kiválasztását.



Nyissa ki teljesen a terméket, és helyezze a szárnyakkal és a rögzítőszalagokkal ellátott végét a hátoldalra, ügyelve arra, hogy a szárnyak teljesen kinyíljanak a párna felhelyezése előtt. Győződjön meg róla, hogy a hátlap kívül van, és a puha fehér belső bélés a bőr mellett van.



Gyengéden hajtsa össze és csukja be a betétet hosszanti irányban, hogy a szivárgásgátak felálljanak.

Használat



Helyezze a párnát a lábak közé úgy, hogy először jól illeszkedjen a viselőjéhez, és kényelmesen illeszkedjen az ágyéktájékhoz. Használja a nedvességjelzőt, hogy segítsen a betét pozicionálásában és középre helyezésében.



Óvatosan húzza a szárnyat a párna elejére. Használja a kék pozicionáló szalagot a termék mindkét oldalra történő előzetes felviteléhez.

6



Rögzítse a szalagokat szilárdan a termékre.

A pelenka eltávolításakor emelje le a fehér szalagot a kék szalagról, ügyelve arra, hogy a kék szalag a vízálló hátlapon maradjon.

A felhasználó anatómiájától függően állhatnak a szárnyak.

7



Átfedés

Közel legyenek egymáshoz

Legyenek közelebb az pelenka széléhez

Tanácsok és tippek:

Termék kiválasztása:

- Fontolja meg az Attends betét használatát mielőtt áttér a nadrágpelenkára - ezek sokkal nagyobb diszkréciót biztosítanak.
- Válassza ki a terméket a csípő- vagy derékméretnek megfelelően amelyik a nagyobb.
- Válassza ki a nedvszívó képességet a vizelet mennyiségétől függően. Kezdje az alacsonyabb nedvszívó képességű például a 8-as szintet, mielőtt magasabbra váltana, a diszkrétebb és kényelmesebb illeszkedés érdekében.

Csere

- Ellenőrizze a nedvességjelzőt - ha a nedvességjelző eltűnt a betét hosszának felénél (60%), vagy ha a termék széket tartalmaz, a betétet cseréire szorul. A Slip Regular Small és az Extra Large, ha a nedvességjelző a sárgáról kék színűvé változott a betét hosszának felénél (60%), vagy ha a betétet széket tartalmaz, a betétet ki kell cserélni.
- Zárja vissza és használja újra a Slip-et WC-használat után, ha a termék tiszta és száraz.
- Ne ragasszon ragasztó csíkot a bőrre.
- Tisztítsa meg a bőrt a helyi szabályoknak megfelelően. Tisztítsa meg előlről hátrafelé.
- Lehetőség szerint kerülje az olaj alapú krémeket és egyáltalán ne használjon púdereket. Ezek befolyásolják az abszorpciós képességet. megakadályozzák a vizelet felszívódását, és a betétet a bőrt veszélyeztetik.

Illeszkedés:

- Győződjön meg róla, hogy a gumírozott rész a lábszártónél a betét külső részén helyezkedik el.
- Tartsa a ragasztószalagokat hátul a pelenka felhelyezésekor- így tudja, hogy a megfelelő irányban van.

- A pelenka rögzítésekor először az alsó szalagokat rögzítse. felfelé, majd a felső szalagokat lefelé, hogy kényelmes, pontos illeszkedést biztosítson.
- Ha a terméket a felhasználó fekvő helyzetben szereli fel, ugyanazt a sorrendet kövesse, mint ha álló helyzetben szerelné fel. Annak biztosítása érdekében, hogy a termék a helyén maradjon, helyezze a kezét a pelenka hátuljára, amikor a beteget megfordítja.
- Használja a nedvességjelzőt a betét középre helyezéséhez.

Szivárgás:

- Ellenőrizze a pelenka megfelelő illeszkedését.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretet használ-e.
- Csak akkor növelje a betét nedvszívó képességét, ha ellenőrizte, hogy ez nem illeszkedési probléma, és ezt klinikailag igazolt is.

Eltávolítás:

- Tekerje fel a pelenkát, és a helyi hulladékkezelési szabályoknak megfelelően hatástalanítsa.
- Ne húzzuk le a WC-n.



Attends Slip Active are tested and approved by proDERM, Institute for Applied Dermatological Research.

További információért keresse a www.replant4care.hu weboldalt.