

## ConvaTec egyrésztes irrigációs zsák

A Stomadress® egyrésztes irrigációs zsákot olyan irrigáló kolosztómás betegek számára fejlesztették, akik az egyrésztes sztómaterápiás rendszert részesítik előnyben. A Stomadress® irrigációs zsákot közvetlenül a sztómat körülvevő bőrfelületre kell felhelyezni.

**FIGYELEM:** Óvatosan használja az öntapadó termékeket az egy szintben lévő urosztómánál, különösen akkor, ha megauréterrel van összekötve és nincs vizeletgyűjtő. Esetenként előfordulhat, hogy az említett esetben, a vizeletgyűjtő rendszerben ragasztóanyag mutatható ki. Bizonyos esetben érdemes mérlegelni a termékek további használatát, ill. a klinikai megfigyelést.

### Használati útmutató

1. A zsák felhelyezése előtt tisztítsa meg a sztóma körüli bőrfelületet vízzel és ph semleges szappannal, majd szárítsa meg alaposan a bőrt.
2. Távolítsa el a védőfóliát a zselatinos tapadófelületről és helyezze a sztóma köré az irrigációs zsákot. Simítsa el a tapadófelület éleit.
3. Hogy meggyőződjön róla, hogy a zsák megfelelően tapad, enyhén húzza meg.
4. Mielőtt nekikezde az irrigálásnak, zárja el a zsák alsó végét a mellékelt kapoccsal.
5. Miután megfelelő mennyiségű vizet juttatott az irrigátora segítségével a zsák felső részébe (lásd leírás a csomagolásban mellékelve), mindkét csipesz segítségével fel tudja függeszteni a zsákot, amennyiben a zsák alját szeretné fent rögzíteni.
6. Sikeres irrigálás után távolítsa el a zárókapcsot a zsák végétől és lógassa a WC-be. A zsák tartalmát ürítse álló helyzetben a WC-be.
7. Fönről lefelé húzva óvatosan távolítsa el a tapadófelületet, miközben szabad kezével fogja le a hasbőrt.
8. Amennyiben ragasztóanyag marad a bőrfelületen, vízzel és ph semleges szappannal vagy ConvaCare® eltávolító kendővel távolítsa el, semmiképp ne használjon benzint vagy étert.
9. A használt Stomadress® irrigációs zsákot helyezze ConvaTec hulladékkezelő zsákba. Ne dobja a Wc-be, mert dugulást okozhat.

### Egyszerhasználatos

Gyártja: ConvaTec Inc.

Forgalmazza: Replant 4 Care Kft., 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.