

Detské výpustné vrecko

Jednodielny systém

Návod na použitie



Za oskrbo stome pri otrocích

Enodelní systém za oskrbo stome

Navodilo za uporabo

ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
USA
1-800-422-8811ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UKSponsored in Australia by:
ConvaTec (Australia) Pty Ltd.
1800 339 412 Australia
0800 441 763 New ZealandEC REP UNOMEDICAL A/S
Aaholmej 1-3, Østet
4320 LEJE DENMARK株式会社コンバテック ジャパン 株式会社
お問い合わせ窓口
電話番号: 0120-532384

⊗ Nepoužívajte opakovane

⚠️ Upozornenie ☐ Pozrite si návod na použitie

Určené na ostrenie stômii u detí.
Upozornenie: Pri používaní súhlasených výrobkov pri vylepšujúcej určenosti treba počúvať opatrnosť, najmä v súvislosti s následujúcimi a v neplnomestí možnej nádrže. Klinické správy v zriedkavých prípadoch zaznamenali príomnosť adhezív na ľadvinovom zbernom systéme riziko pacientov. V prípade zistenia hmoty v motovom ústrojenstve zvážte ďalšie používanie adhezívneho výrobku a nasadte zodpovedajúce klinické prostriedky.**UPOZORNENIE.**

Využite jemný lak na brúško bábalka pri aplikácii akéhokoľvek vrecka.

Určené použitie: Iadlenie stomačnej produkcie.

Indikácie na použitie: Na použitie pri urostení.

Táto pomôcka je určená na jedno použitie a nemá sa používať opakovane. Opakovane použitie môže viesť k zvýšenému riziku infekcie alebo krízovej kontaminácie. Fyzikálne vlastnosti pomôcky vtedy už nemusia byť optimálne pre určené použitie.

Ak počas používania tejto pomôcky alebo v dôsledku jej požitia dojde k závažnému incidentu, hnalisté to výrobcovi a svojmu vnútroštátu nemu drádu.

POUŽITIE

Koža v okolí stômii musí byť čistá, suchá a zbavená akýchkoľvek rozprášadiel alebo mastných látok.



Vyznačte presne obrys stômii na kryc papier.



Pred vystrihnutím oddeľte kryc film.



Vystrihnutím podľa obrysov. Odstráňte kryc papier.



Umiestnite vrecko na stômii. Zaistite priliehanie okolo stômii.

Tento výrobok môže byť používaný aj pri kúpaní. Po namočení jemne vysušte uterákom.

ODSTRÁNENIE**POUŽITIE VÝPUSTNÉHO KOHÚTKA**

Na pripojenie k nočnému zbernému systému:

**ZNEHODNOTENIE**

Po používaní tento výrobok predstavovať potenciálne biologické riziko. Manipulujte s ním a likvidujte ho v súlade s akceptovanou lekárskou praxou a platnými miestnymi právnymi postupmi a nariadeniami.

PODMIENKY SKLADOVANIA

Dovozca

MD Zdravotnícka pomôcka

Upozornenie: ak sa objaví podráždenie konzultujte odborných zdravotníckych pracovníkov.

Ďalšie informácie o výrobkoch ConvaTec dostanete na doleuvedenej adrese.

© 2021 ConvaTec Inc.
® registrovaná značka ConvaTec Inc.

⊗ Ni primero za ponovo uporabo

⚠️ Upozornenie ☐ Preberite navodila za uporabo

Za uravnavanje izložkov iz stome pri otrocích.

OPOZORILO: Ob uporabi adhezivnih prizvodov za prelivne urostenie, morate biti posebej previdiv v prípade megaezetrov in v odnosnosti zberacieho za seč. V posamezných klinických prípadoch so pri bolníkach s tvrdom okvárom dokazali príslušnosť adheziva v zberálnom systéme ľadvíc. V prípade, da v sečiach odskliejte gmoť (maso), ponovne ovrednotite nadľaho uporabu adhezivného prizvoda in príčne s ustreznim klinično obrávanavo.

OPOZORILO

Ko namešte vrečko na podlogu jo nežno pritisnite na trebuš otroka.

Previdena uporaba: Uravnavanje stomačnych izložkov.

Indikácie za uporabu: Za uporabo pri urostení.

Ta prípomocňa je namenjan samo za enkratno uporabo in ga ne smete uporabiti znova. Ponovna uporaba lahko poveča tveganje za okužbo ali navzkršno kontamináciu. Poleg tega se fizične lastnosti prípomocňa lahko spremeniť tako, da ni več optimalen za predviđeno uporabo.

Če med uporabo tega prípomocňa ali posledično zaradi njegove uporabe pride do resnegra incidenta, z njim seznanite prizvajalca in vaš nacionalni drádu.

NAMESTITEV

Koža ob stomi mora biti čista suha. Na njej ne sme biti topil in/ali mastnih snovi.



S svinčnikom naredite natančen obris roba stome na zaščitnem papirju kožne podlage.



Ločite zaščitna papirja pred rezanjem.



Zarežite po obrisu. Odstranite zaščitni papir kožne podlage.



Nameštite vrečko na stome. Podloga naj se tesno prilega stomi.

Prípomocňa lahko pusťte med kopjanjem na telesu. Posušite ga lahko z brisáča.

ODSTRANITEV**UPORABA PREPOGLJIVEGA OTOKA**

Za povezavo z nočnim drenažním systémom:




Opomba: V primeru pojava draženja, se posvetujte z medicinskim strokovnjakom.

Vse dodatne informacije o prizvodeh družbe ConvaTec so dosegljive na spodnjih naslovih.

© 2021 ConvaTec Inc.

© je registriran zaščitni znak ConvaTec Inc.

Nestrihať za poslednú čiaru na šablóne výreza.

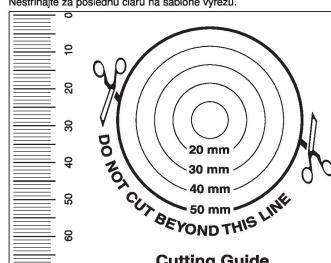

Ne režite preko te črte. Merilec za rezanje

