

A CONVATEC által forgalmazott TRIO Healthcare termékek használata

Niltac™ 50ml spray (kód: TR 101)

Gyorsan és könnyedén eltávolítja a gyógyászati ragasztóanyagot a bőr felületéről



- Fújja a Niltac™ a ragasztófelület széle köré, és várjon pár másodpercet.
- Finoman hámozza le a ragasztófelületet, ha kell, még fújjon egy keveset.
- Néhány másodpercen belül megszárad. Száradás után a Niltac™ nincs hatással a később felhelyezett kötszerek vagy egyéb eszközök felhelyezésére.
- A Niltac™ fejjel lefelé is használható.

Niltac™ törülőkendők (kód: TR 102)

Gyorsan és könnyedén eltávolítja a gyógyászati ragasztóanyagok maradékát a bőr felületéről



- Tépje fel a zacskót és vegye ki az összehajtogatott zsebkendőt.
- Dörzsölje a törülőkendővel a bőrfelületet, a ragasztóanyag maradékának eltávolításához
- A Niltac™ néhány másodpercen belül megszárad, a bőr felületét úgy teszi tisztává, hogy a további tapadás nem akadályozott.

Sillesse™ puha törőkendő (rendelési kód: TR 103)

100% szilikonos bőrvédelem



- Tisztítsa meg és alaposan szárítsa meg a bőrfelületet.
- Tépje fel a zacskót és vegye ki az összehajtogatott kendőt.
- Finoman törölje át a bőrvédelemre szoruló területet, majd várjon néhány másodpercet, míg megszárad.
- Győződjön meg róla, hogy a Sillesse™ teljesen megszáradt, mielőtt tapadó terméket helyez a kezelt felületre, mint pl. tapadó eszközt vagy kötszert.

Sillesse™ spray (rendelési kód: TR 104)

Nagyobb felületekre. Spray 100% szilikonból, a bőrvédelemért.



- Rázza fel alaposan használat előtt!
- Tisztítsa meg és alaposan szárítsa meg a bőrfelületet.
- Tartsa kb. 10cm-re a kezelendő területtől, söprő mozdulatokkal vigyen fel egyenletesen egy bevonatot.
- Győződjön meg róla, hogy a Sillesse™ teljesen megszáradt, mielőtt tapadó terméket helyez a kezelt felületre, mint pl. alaplapot vagy sztomazsákot.

Összetevők: 100% sziloxán

Ha nem tapadó termék alá alkalmazza a Sillesse termékek valamelyikét, akkor 12-72 óránként újra fel lehet vinni a bőrfelületre, szükség esetén. Nem szükséges eltávolítani előtte a korábban felvitt Sillesse terméket. De ha szükséges, a Sillesse™ könnyen eltávolítható [Niltac™ szilikonos \(gyógyászati\) ragasztó eltávolító termékekkel](#).