

STOMADRESS PLUS SZTÓMASAPKA

Használati útmutató

Egyrészes sztómasapka STOMAHESIVE bőrvédő zselatinos tapadófelülettel és beépített szűrővel

Termékleírás

STOMADRESS PLUS sztómasapkát irrigálást végző betegeknek fejlesztették ki. Ezenkívül azoknak a sztómaviselőknak ajánljuk, akik valamilyen sporttevékenységet végeznek vagy gyors ellátásra szorulnak.

A sztómasapka kiváló bőrvédő hatású STOMAHESIVE zselatinos tapadófelülettel és beépített, nagy teljesítményű szűrővel van ellátva.

Használata előnyös, mert:

1. Kítűnő bőrvédő tulajdonságokkal rendelkezik, és hozzáadott ragasztó nélkül is biztos tapadást biztosít az STOMAHESIVE-zselatinalap segítségével. A zselatinalap természetes eredetű cellulózt és pektint tartalmaz.
2. Viselése magasabb komfortérzetet biztosít.
3. A sztómasapkába helyezett flisz anyag a sztómasapka nedvszívó képességét biztosítja.
4. A sablon segítségével egyéni szükségletnek megfelelően 50 mm-ig minden sztómanagyság és -forma kivágható.

Használati tanácsok

1. Mérje le a mellékelt sablonnal az ön sztómanagyságát és rajzolja körbe azt a mintapapíron.
2. Megfelelő ollóval (estleg körömvágó ollóval) vágja ki a nyílást. Ügyeljen arra, hogy ne vágjon túl a sablonon megadott vonalon.
3. Ajánljuk, hogy a sztóma és a zselatinalap közötti szabad, védtelen bőrfelületet fedje le STOMAHESIVE-bőrvédőpasztával.
4. Távolítsa el a fedőpapírt és ragassza a zselatinalapot középre, úgy, hogy a nyílás félig látható legyen. A sapkát fektesse az alsó sztómarészre és felfelé görgetve helyezze el a sztómán.
5. Körkörös mozdulattal simítsa a sztóma köré a sztómasapkát a megfelelő tapadás biztosítása érdekében. Egyéb ragasztó anyag nem szükséges.

Eltávolítás

A sztómasapka eltávolítása felülről lefelé úgy történik, hogy az egyik kezünkkel megtámasztjuk a bőrt és egyidejűleg a szabad kezünkkel húzzuk le a sztómasapkát.