

Rövid nyúlású kompressziós kötés ép bőrön való használatra (orvostechnikai eszköz)

### URBA-LAN / URBA-LAN ULTRA

#### Termékleírás

- Ez a kötszer főbször használható, rövid nyújthatóságú kompressziós kötés (nem steril termék). A kötszer vénás megbetegedések és más okból fellepo ödémák (0,8–1,3 ABPI\*) kompressziós terápiajára alkalmazható. Ezenkívül a kötszer alátamasztó és tehermentesítő kötésként is használható, a tartó- illetve mozgatórendszer sérülése esetén.
- A termék csak érintetlen (sértetlen) bőrre helyezhető fel. A termék alkalmazása előtt a sebeket le kell fedni megfelelő sebkezeléssel.
- Ezt a rövid nyújthatóságú kompressziós kötéset felhelyezhetik megfelelő oktatásban részesített lakosok, illetve egészségügyi szakemberek is, mind klinikai, mind otthoni környezetben.
- Rövid nyújthatóságú tulajdonságai miatt a kötszer munkanyomása magas, nyugalmi nyomása pedig alacsony (mozgásképes betegeknek). Ezáltal redukálhatók az ödémák.
- Alátamasztó, illetve tehermentesítő kötésként való alkalmazása esetén stabilizálja az izmokat, inakat, szalagokat és ízületeket.

\* ABPI – ankle brachial pressure index

#### Javallatok

##### Krónikus vénás megbetegedések

- Vénás ödémák megelőzése és kezelése
- Vénás bőrelváltozások megelőzése és kezelése
- Ekcéma és elszineződés
- Dermatoposclerosis és atrophia alba
- Ulcus cruris venosum kezelése
- Ulcus cruris venosum ismétlődésének megelőzése
- Visszerek
- A visszerekkelés utáni első fázis
- Funkcionális vénás elégtelenség (álhizas, ülő- és állófoglalkozások esetén)
- Vénás fejlődési rendellenességek

##### Tromboembóliás vénás megbetegedések

- Felületi vénás trombozisek
- Mélyvénás trombozisz karban és lában
- Postthromboticus szindróma
- Tromboziszprofilaxis mozgásképes betegeknek

##### Ödéma

- Nyiroködéma
- Terhesség alatt fellepo ödéma
- Trauma után fellepo ödéma
- Műtét után fellepo ödéma
- Műtét után fellepo reperfüziós ödéma
- Ciklikus idiopátiás ödéma
- Zsírödéma a II. stadiumtól
- Törődásos állapotok mozdulatlanság miatt (arthrogen törődásos szindróma, a végtagok benulása és részleges benulása)
- Gyógyszerek által kiváltott ödéma, ha alátámasztás nem lehetséges

##### Más javallatok

- Elhizas funkcionális vénáselégtelenséggel
- A lábak gyulladásoos bőrbántalmi
- Törődásos panaszok a terhesség alatt
- A tartó-, illetve mozgatórendszer sérülései

##### Ellenjavallatok

- Előrehaladott perifériás artériás elzáródások megbetegedés (ha ezen paraméterek egyike megfelel az ABPI < 0,5 értéknek, ahol az artériás nyomás a bokaánál < 60 Hgmm, a nagylábujjal pedig < 30 Hgmm vagy TcPO2 < 20 Hgmm a rúsznál),
- Dekompenzáll szívelegtelenség (NYHA III + IV)
- Szeplikus phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

##### Relatív ellenjavallatok

- Kifejezetten nedvező dermatozisek
- Intolerancia a kompressziós anyaggal szemben
- Súlyos érzékelesi zavarok a végtagokban
- Előrehaladott perifériás neuropátia (pl. diabetes mellitus esetén)
- Elsődleges krónikus polyarthritis

##### Felhelyezési módszer (ajánlás) vagy az orvos utasításai szerint

- A felhelyezés alatt vigyázni kell arra, hogy a beteg lábfeje az alsó lábszarval 90°-os szöget zárjon be, és hogy ez a szög az alkalmazás teljes ideje alatt megmaradjon.
- Helyezze el a kötéset a talp középső területén és tartsa erősen.
- Tekerje a kötéset egy fordulattal, mérsékelt feszítés mellett a lábujjak alapzúlete köre, és emelje meg kissé a láb külső elét.
- A medialis oldalról kiindulva, tekerje az Achilles-in és a sarok köré. Anélkül, hogy a rúszt felett húzza, vezesse a belső bokához.
- A belső bokától kiindulva zárja körbe a sarok talpszétét a kötszerrel, majd vezesse tovább 45 fokos szögben az alsó lábszarv fele (nyolcas alakzat).
- A következő spiralfordulatok 50%-os átfedéssel haladnak a terdzület irányában.
- Helyezze fel a kötéset a megadott távolságban spirálisan felfelé kötésként.
- Helyezze fel a kötéset spirálisan mindaddig, amíg egy kez szélességig tisztán helyezkedik el a terdzülethez képest. Az utolsó fordulat a szarkapocscsont feje felett halad át, és általában medialisan végződik.
- Rögzítse a kötés végét ragtapaszcsikkokkal.
- Az alkalmazási technikát a lehetőségekhez képest a beteg anatómiai és patofiziológiai sajátosságaihoz kell igazítani.

##### További útmutatások

- A kompressziós terápia kezdete előtt Doppler vizsgálatot kell végrehajtani az ABPI meghatározása céljából.
- A kötszeren lévő csapok csak a szállítási biztonságát szolgálják. Rendeltesük szerint nem alkalmazhatók a betegben.
- A kötések a bőr kiszáradatához és viszketéshez vezethetnek. Ezért ajánlott hatóanyagmentes alapállapotú calszerűen eszterkentet végrehajtani.
- A felhelyezés után figyeljen a lábujjak jó keringésére, hogy meggyőződjön arról, hogy a kötés nyomása nem túl magas. Ha a rövid nyújthatóságú kötszerrel való kezelés alatt fájdalom vagy komplikáció jelentkezik, pl. tartos elszineződés (kék vagy fehér lábujjak), akkor a kötéset haladéktalanul le kell venni és azt a kezelőorvosnak jelenteni kell.

**Kérjük, vegye figyelembe:** Ha ezen termék alkalmazásakor alapos gyanúja van, hogy súlyos incidens lépett fel, akkor jelentse ezt a gyártónak és az országos hatóságának.

#### Mosási utasítások (kezelési feltételek)

Hasonló színakkal mossa együtt.  
A termék funkcionálitása alkalmazás utáni mosás révén helyreáll.



\*Alternatív felhelyezési technika, nem ismertetett a szövegben