

URBAN®

A minőség kötelez

Rövid megnyúlású pólya használati utasítás

URBA-LAN / URBA-LAN-ULTRA

TULAJDONSÁGOK:

- bőrbarát, jó légáteresztő, különleges szövésénél fogva nem csúszik el
- megnyúlás: URBA-LAN c.a. 70%, URBA-LAN-ULTRA c.a. 40%
- éjszaka is viselhető alacsony nyugalmi nyomásának köszönhetően
- mosható és sterilizálható (autokláv 121°C)

ALKALMAZÁS:

- A végtagok kompressziós terápiájában akut és krónikus vénás betegségek esetén, mint varicositas, ulcus cruris, thrombophlebitis, valamint lymphoedema kezelésére. Visszértérvek utókezelésére. Rándulások és zúzódások esetén rögzítésre és tehermentesítésre használható a traumatológiában és a sportorvosi gyakorlatban.


ELLENJAVALLAT:

- dekompenzált szívelégtelenség
- előrehaladott stádiumú perifériás artériás elzáródás
- szepikus phlebitis
- nyílt sebek
- váladékozó dermatózisok
- phlegmasia coerulea dolens
- a pólyára vagy alkotórészeire tapasztalt allergiás reakció.

Körkörös kompressziós kötés



Dupla tekeréses technika

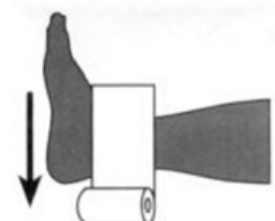

Általános utasítások:

1. A pólyát célszerű reggel rögtön a felkelés után, vagy a láb hosszabb felpolcolása után felhelyezni.
2. A pólya szélessége a láb átmérőjének feleljen meg (szabály szerint 6, 8, 10 vagy 12 cm)
3. Feltekeréskor a lábfejet általában 90° -os szögben behajlítva tartjuk.
4. Olyan húzással tekerjük fel a pólyát, hogy a szorítóerő a lábfejtől a térd felé csökkenjen.
5. A pólyatekeréskor a lábfej közelében gördítsük úgy, hogy a pólya kifelé nézzen.
6. A tekeréskor az orvos utasításainak feleljen meg.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ:

A pólya 10 mosásig megőrzi jó tulajdonságait, ha a következő tanácsokat betartjuk:

1. Használat után lazán tekerjük fel a pólyát
2. Gyakran (2-3 naponta), nyomkodva mossuk, kézmeleg vízben, finom mosószerrel
3. Fektetve szárítsuk, a nagy hőhatástól védjük (pl. tűző nap)



Forgalmazza:

Replant 4 Care Kft.
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.
Tel.: 06-1-374-9080

