

TANÁCS A PRESSURECARE TERMÉKEK HOSSZÚ ÉLETTARTAMÁNAK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA

Köszönjük, hogy a Pressurecare termékkínálatot választotta.

Termékeink a felfekvéses fekélyek megelőzésében és műtéti környezetben a megfelelő elhelyezésre szolgálnak. Egy betegnek az ilyen típusú sérülésekre való hajlamosságát sok tényező befolyásolja, köztük olyan belső tényezők, mint az általános egészségi állapot, a kor, a beteg testsúlya és már meglévő betegségei. A beteg nyomással összefüggésben keletkező sérüléseinek kockázata csökkenthető a Truelife termékcsalád megfelelő alkalmazása és a helyes klinikai gyakorlat betartása révén. Megfelelő gondozással és odafigyeléssel biztosítható a Pressurecare termékek hosszú élettartama és tartóssága.

A Pressurecare termékek általános használata

- A helyes klinikai gyakorlatnak megfelelően mérje fel a beteg állapotát és a veszélynek kitett helyeket, mielőtt eldönti, hogy mely betéteket és pozicionálókat használja.
- Mindenkor gondoskodjon a beteg megfelelő, biztonságos és stabil elhelyezéséről, és kerülje a túlzott nyomás alkalmazását minden helyen. Különösen a fokozott kockázatnak kitett helyekre figyeljen.
- Elhelyezhet egy lepedőt a terméken, ugyanakkor ez az eljárás csökkenti a termék nyíróhatásokat enyhítő tulajdonságait. Ha mégis használ lepedőt, a lepedőt lazán kell a termékre helyezni, és ügyelni kell, hogy a lepedő ne legyen keményített, illetve gyűrődés- és hajtásmentes legyen.
- Óvatosan bánjon a termékekkel. Ne helyezzen éles műszereket a termékekre, mivel azok kilyukasztják a filmet.
- A betéteket 40 °C hőmérsékletre előmelegített sütőben vagy fűtött matracon melegítse fel testhőmérsékletre. Kövesse a sütő vagy a matrac gyártójának megfelelő utasításait. (Kérjük, tanulmányozza a helyes klinikai gyakorlatot.)
- A termékek -12 °C hőmérsékletre lehűthetők anélkül, hogy károsodnának.
- Ne húzza meg az asztalbetéteket, miközben a beteg rajtuk fekszik, mivel a túl nagy erő káros hatást fejt ki rájuk.
- Ne húzza a terméket durva vagy éles felületeken.
- Dobja ki a terméket, ha bármilyen károsodás történik (pl. vágás, repedés vagy szakadás). Javítókészlet áll rendelkezésre, de az csak átmeneti megoldásként használható.
- A terméket nem érheti nyílt láng.
- Nehéz termékek emelése esetén alkalmazzon megfelelő emelési technikákat.

Oasis végtag szíj (OA113) és Oasis pozicionáló szíj (OA110)

A terméknek az a feladata, hogy segítse a beteg stabil elhelyezését a műtőasztalon, és nem alkalmas a beteg súlyának megtartására.

EL903 és EL904 hasonfekvő helyzet pozicionálók

- A maximális védelem érdekében a termékeket a fejtámasszal (EL141) és az alacsony mellkas hengerpárnával vagy a lábat megemelő univerzális pozicionálóval együtt kell használni.
- Ügyeljen a beteg biztonságos és stabil pozicionálására.
- Ügyeljen arra, hogy a szíjak stabilan illeszkedjenek az asztal oldalsínjei köré.

Oasis EL905 hason fekvő és oldalfekvő helyzet pozicionáló rendszer

EL905: hason fekvő pozicionáláshoz

- Az EL905 sokoldalú és rugalmas termék, amely a beteg szükségleteihez igazítható. A helyes összeállításához igazítsa egymáshoz a fekete pontokat a 2. oldal 1. ábrájának megfelelően.
- A maximális védelem érdekében a termékeket a hason fekvő fejtámasszal (EL141), a térdbetéttel (EL401/402) illetve alacsony mellkas hengerpárnával vagy a lábat megemelő univerzális pozicionálóval együtt kell használni. Ügyeljen a beteg biztonságos és stabil pozicionálására. (Lásd az 1. képet a 3. oldalon.)
- A tépőzár tapadásának megőrzése érdekében húzza le a pozicionálót az alaplapról a bal belső sarokból kiindulva.
- Ügyeljen arra, hogy a szíjak stabilan illeszkedjenek az asztal oldalsínjei köré.

EL905: oldalfekvő testhelyezethez

- Állítsa össze az EL905 eszközt hason fekvő testhelyezethez (Lásd 2. oldal 1. ábra)
- Fordítsa el a két felső zselés darabot; folyamatos fekete vonalat fog látni (Lásd 2. oldal 2. ábra).
- Mozdítsa el az EL905 másik 4 darabját lefelé a következő tépőzárhoz, így beilleszthető az EL101.
- Az EL905-öt az ábrának megfelelően kell beállítani, miután ez a beállítás megtörtént, azon tovább módosítani nem szabad.
- Ha az EL905-öt oldalfekvő testhelyezethez alkalmazza kérjük, hogy az EL022 / nyitott fejgyűrűvel és az EL101 kar támasztópárnával használja (Lásd 2. oldal 3. ábra).
- A váll alá is EL101 párnát kell helyezni. (Ez a párna az EL905 fekete műanyag alaplemeze alá kerül, a 2. oldal 2. ábrájának megfelelően). A beteg teste semmiképp nem érintkezhet az EL905 fekete műanyag alaplapjával.
- Ügyeljen a beteg biztonságos és stabil pozícionálására.
- Ügyeljen arra, hogy a szíjak stabilan illeszkedjenek az asztal oldalsínjei köré.

TANÁCS A PRESSURECARE TERMÉKEK HOSSZÚ ÉLETTARTAMÁNAK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA.

A Pressurecare termékek tisztítása.

- A termékeket használat előtt és után fertőtleníteni kell.
- A termékek általános műtőszoba tisztítószerrel könnyen tisztíthatók. Kerülje a termékek áztatását tisztítófolyadékban.
- Ha a termékhez tépőzár tartozik, akkor azt használaton kívül lezárt állapotban kell tartani a porlerakódás csökkentése érdekében.

Kezelés

Óvatosan távolítsa el a betéteket az asztalról vagy sebészeti berendezésről. A nagyméretű (habot nem tartalmazó) asztalbetéteket feltekerve és a karjával átfogva mozgathatja. A nagyobb hab vagy géltöltetű termékeket alulról kell mindkét kézzel tartani, vagy ha lehetséges két karral kell átfogni. A terjedelmes darabok szállításához szállítókocsi alkalmazása ajánlott.

A Pressurecare termékek tárolása

- Kb. 35 cm-es részekre hajtogassa össze a nagy asztalbetéteket.
- Ne helyezzen nehéz vagy éles tárgyakat egyetlen termékre sem.
- Szobahőmérsékleten tárolja a terméket.

Oasis Elite asztalbetétek (EL030 és EL031)

A lehető legjobb eredmények érdekében tárolás közben a zselés oldal kifelé nézzen.

Eltávolításra vonatkozó utasítások

A terméket az összes helyi és országos törvénynek és rendeletnek megfelelően kell eltávolítani. A Pressurecare termékhez használt összes csomagolóanyag újrahasznosítható.

Forduljon a helyi forgalmazóhoz abban a nagyon valószínűtlen esetben, ha bármilyen probléma merül fel a Pressurecare termékkel kapcsolatban.

Visszaküldés előtt fertőtlenítsse a károsodott terméket.

Ha a termékinnalattal vagy azok alkalmazásával kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, vagy bármilyen megjegyzése van a termékekre vonatkozóan, forduljon a helyi forgalmazóhoz.

MEGJEGYZÉS: ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ.