

KOB

Gyártja: Karl Otto Braun, Németország




URBA-LAN®


URBA-LAN® ULTRA

## HATÁSMECHANIZMUS:

- A TB támogatott Urba-Lan és Urba-Lan Ultra kompressziós pólyák használatával nyomást gyakorlunk kívülről a vénákra, így azok átmérője csökken, a vénabillentyűk bezáródnak, a vér felfelé áramlik, és az ödéma megszűnik.

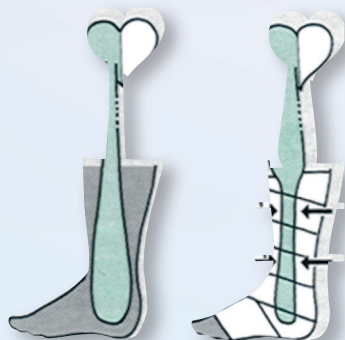

- Az Urba-Lan és Urba-Lan Ultra használatával az alsó végtag kompressziója krónikus vénás elégtelenségben fokozza az előre irányuló áramlást, és javítja az izompumpa határfokát.

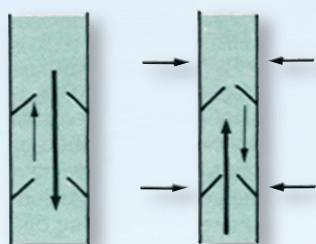

## MEGFELELŐ PÓLYÁZÁS TECHNIKÁJA 6 LÉPÉSBEN:

A pólyát célszerű reggel rögtön a felkelés után, vagy a láb hosszabb felpolcolása után felhelyezni. A láb átmérőjének megfelelő szélességű pólyát válasszunk és a boka felső részétől kifelé haladva tekerjük a pólyával körbe a lábszárat átvezetve azt a talp alatt. Figyeljünk arra, hogy feltekeréskor a lábfejet 90°-os szögben, behajlítva tartsuk.



1 Úgy tekerjük föl a lábfejre a pólyát, hogy az ujjakat szabadon hagyjuk, ezután a sarok alatt vesszük át a pólyát.



2 Vesszük körbe a pólyát a bokacsont körül, majd ismét a sarok alatt.



3 Miután ismét áttekertük a pólyát a boka körül, kezdünk el felfelé haladni a vádli mentén. Olyan húzással tekerjük föl a pólyát, hogy a szorítóerő a lábfejtől a térd felé csökkenjen.



4 Ezt követően térjünk vissza a vádli alá.



5 Haladjunk felfelé a pólyával a térd vonaláig.





Gyártja: Karl Otto Braun, Németország



Urba-Lan

Urba-Lan  
Ultra

## TERMÉKELŐNYÖK:

- Bőrbarát tulajdonságúak, a pamut szálaknak köszönhetően.
- Könnyen használhatóak, mert szövetszerkezetük csúszásmentes tartást biztosít a pólyameneteknek.
- Moshatóak, főzhetőek, sterilizálhatóak (minőségüket 10 mosásig megőrzik).
- Hosszú ideig viselhetőek, éjszaka fenn hagyhatóak.

Terméknév	OEP támogatás mértéke	Jogcím
<b>40%-os megnyúlású kompressziós pólyák</b>		
Urba-Lan Ultra 5 m x 6 cm	80%	Közgyógy
Urba-Lan Ultra 5 m x 8 cm	80%	Közgyógy
Urba-Lan Ultra 5 m x 10 cm	80%	Közgyógy
Urba-Lan Ultra 5 m x 12 cm	80%	Közgyógy
<b>70%-os megnyúlású kompressziós pólyák</b>		
Urba-Lan 5 m x 6 cm	80%	Közgyógy
Urba-Lan 5 m x 8 cm	80%	Közgyógy
Urba-Lan 5 m x 10 cm	80%	Közgyógy
Urba-Lan 5 m x 12 cm	80%	Közgyógy

Az érvényes TB támogatási információért, kérjük, keresse fel a <http://sejk.oep.hu/> oldalt.

Kérdésével, tanácsért hívja vevőszolgálatunkat a  
**(06-1) 374-90-80** telefonszámon.

A prospektusban szereplő termékek gyógyászati segédeszközök.  
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

Forgalmazza:

**REPLANT**  **CARE**

1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.

Telefon: 06 1 374-9080

Fax: 06 1 269-3274

[www.replant.hu](http://www.replant.hu)